

КОЛДИСЕПТ

НАНОСИЛЬВЕР

Ушные капли



Изделие медицинского назначения в форме ушных капель предназначен для поддерживающего лечения воспаления наружного слухового прохода, вызванного бактериальными и грибковыми инфекциями.

Колдисепт наноСильвер ушные капли предназначены для введения в наружный слуховой проход с целью смягчения и удаления любых загрязнений, а также для создания защитного барьера на поверхности кожи. Препарат содержит наночастицы серебра и меди, которые ограничивают рост бактерий и грибов. Ушные капли Колдисепт наноСильвер предназначен для поддерживающего лечения воспаления наружного уха различной этиологии.

Упаковка 15 мл

Состав

Вода очищенная, глицерин, полиэтилен гликоль, нанокolloидное серебро, нанокolloидное медь.

Побочные эффекты

Побочные эффекты Колдисепт наноСильвер ушные капли неизвестны, однако у людей с повышенной чувствительностью нельзя исключить аллергические симптомы. При возникновении аллергической реакции использование препарата следует прекратить.

Дополнительная информация и противопоказания

Не используйте препарат в случае наличия у вас аллергии на любой из его ингредиентов.

Не используйте препарат в случае наличия у вас перфорации барабанной перепонки.

Не вставляйте дозатор слишком глубоко в ушной канал.

Не допускайте случайного попадания в глаза и рот.

Прекратите использование препарата в случае возникновения каких-либо тревожных симптомов.

Не используйте после истечения срока годности.

Беременным женщинам и детям в возрасте до 6 лет рекомендуется использовать препарат только под наблюдением врача.

О любом серьезном инциденте, имеющем отношение к изделию, следует сообщать производителю и компетентному органу страны проживания пациента.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, в сухом месте, недоступном для детей.

Использование и дозировка

Используйте Колдисепт наноСильвер ушные капли 3 раза в день, по крайней мере, в течение 3 дней после исчезновения симптомов воспаления.

1. Аккуратно нагрейте бутылку (желательно в руках).

2. Лягте так, чтобы ухо было обращено вверх.

3. Закапайте 5 капель (если вашим врачом не было рекомендовано иное количество) и оставайтесь в этом положении в течение 3-5 минут.

Используйте систематически в соответствии с индивидуальными потребностями.

Дата последнего просмотра инструкции: 01.09.2020

Производитель:
АРКОНА Лаборатория
стоматологической фармакологии,
Насутув 99С, 21-025 Немце, Польша

Произведено
в ЕС для:
Альпен Фарма АГ,
Берн, Швейцария

